

Przeznaczenie:

Skuteczna i ukierunkowana ulga w bólach mięśni i/lub stawów związanych z:

- nadmiernym wysiłkiem
- nadwyrężeniami i skręceniami
- zapaleniem stawów
- napięciem mięśni

### **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności :**

Produkt może powodować oparzenia/pęcherze. Podczas użytkowania należy często sprawdzać skórę. W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia należy natychmiast usunąć produkt.

W przypadku osób w wieku 12-18 lat, które nie są samodzielne wymagany jest nadzór opiekuna.

55 lat lub starsi: Ryzyko poparzenia wzrasta wraz z wiekiem. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać ThermaCare na warstwę odzieży lub materiału i nie nosić go podczas snu.

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku cukrzycy, słabego krążenia, chorób serca, reumatoidalnego zapalenia stawów lub ciąży.

Należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi dyskomfort, pieczenie, obrzęk, wysypka lub inne zmiany na skórze, które utrzymują się w miejscu noszenia kompresu oraz jeśli po 7 dniach ból nasili się lub pozostanie bez zmian.

Każda komórka ciepła zawiera żelazo ( ok. 2 gramów).

- W przypadku potknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Jeśli dojdzie do kontaktu zawartości ciepłej ze skórą lub oczami należy usunąć kompres, przemyć dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Jeśli opakowanie zostanie uszkodzone lub rozdarte podczas użytkowania, należy usunąć produkt.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nigdy nie podgrzewać produktu w kuchenke mikrofalowej ani nie próbować go ponownie podgrzać.

### **Nie należy używać kompresu:**

- Jeśli zawartość komory termicznej wycieka i/lub opakowanie jest uszkodzone lub rozdarte lub jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Jednocześnie z preparatami stosowanymi miejscowo.
- Na zmienioną chorobowo, uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

- W miejscach siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin
- U osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu lub nie są w stanie samodzielnie usunąć produktu.
- Z innymi produktami emitującymi ciepło.
- Poniżej 12 roku życia.
- Na obszarach ciała innych niż tylna część szyi, ramiona i nadgarstek.

**Podczas korzystania z tego produktu:**

Nie używać dłużej niż 8 godzin w okresie 24 godzin.

Nie zakładać kompresu zbyt ciasno.

Komórki ciepłe nie mogą na siebie nachodzić.

Nie należy wywierać dodatkowego nacisku na produkt, np. opierając się o twarde powierzchnie lub nosząc go pod obcisłą odzieżą.

Jeśli produkt jest zbyt gorący, należy zaprzestać jego używania lub założyć go na warstwę odzieży, a nie bezpośrednio na skórę.

Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) należy bezwzględnie usunąć kompres, aby uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.

Kompres powinien być suchy.

Zapoznaj się z sekcją **Instrukcja użycia**.